



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4 Nuevo tope de activación



Fig. 5



Fig. 6

Instrucciones para la gestión



Para la correcta fabricación del dispositivo es necesario enviar al laboratorio:

Modelos superior e inferior con cera en céntrica y las bandas probadas en boca por separado (*nunca tome la impresión con las bandas puestas*).

El aparato es enviado a su consulta **sin Activar**. Fig. 1 y 2

Siga atentamente estas instrucciones para la cementación y gestión del dispositivo.

1. Quite los separadores y aclare cualquier resto que pueda haber quedado en las áreas proximales.
2. Siente el aparato completamente, verificando la buena salud periodontal y la posición pasiva del aparato antes de la cementación (ajústese si fuese necesario).
3. Retire el aparato y después céméntelo de la manera acostumbrada. Fig. 3
4. Después de la cementación limpie los restos de cemento y active el aparato para que pueda comenzar a funcionar.
5. A partir de la cementación el aparato debe ser activado cada cuatro semanas, **exclusivamente por el odontólogo**.
6. **Se activa de la siguiente manera:**
 - Afloje el tornillo del tope $\frac{1}{4}$ de vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj con la llave suministrada. Fig. 4
 - Sin quitar la llave, lleve el tope hacia el muelle de NiTi comprimiéndolo al máximo y vuelva a apretar el tornillo del tope $\frac{1}{4}$ de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Fig. 5
7. Después de haber conseguido el movimiento deseado, puede convertir el aparato, en un aparato de retención de la siguiente manera:
 - Bloqueamos el sistema cilindro pistón comprimiendo el sistema con unas pinzas (tipo Weingart por Ej.) Fig. 6

Rogamos encarecidamente seguir estas instrucciones para la correcta gestión del dispositivo construido por nuestro Laboratorio y su éxito en el tratamiento. Le rogamos no dude en llamarnos si necesita alguna aclaración.



Edif. Montesol 2, Port. 3, Bajo
33594 Posada de Llanes (Principado de Asturias) ESPAÑA
Telfo. / Fax: 34 98-5408509
Email: laboratorio@odontotec.com
www.odontotec.com